

Obecné informace


Lactate Pro je velmi malý , snadno ovladatelný , přesný a velmi spolehlivý laktátový analyzátor .



- Velikost kreditkarty
- Rychlost analýzy 60 sec.
- Odběr ze vzorku 5 mikrol. ,kapka krve o průměru 2 mm
- Přesnost s odchylkou 3%
- Ukládá a zprůměrnuje probíhající měření
- Automaticky nasává krev s vyloučením chybného vzorku
- Uživatelsky velmi příjemný přístroj
- ISO 9001 certifikát
- 10,000 prodaných kusů

Snadná obsluha.

Lactate Pro Set

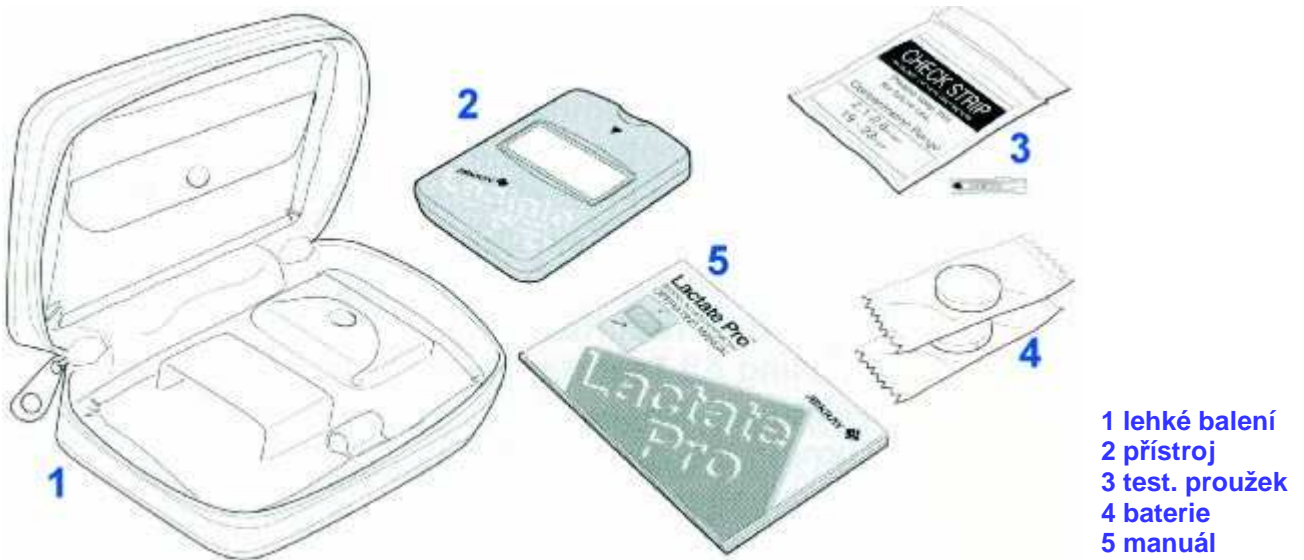

Rychlé a jednoduché měření



1 Vlož svlečený testovací proužek do přístroje



2 Odeber krev



3 Krev je automaticky nasána a začíná měření



4 Výsledek měření je do 60 vteřin

Technické informace

Specifikace

Meter	
Test	Laktát z kapilární krve
Velikost vzorku	5 microL
Testovací proužek	Speciální Lactate Pro
Rozsah měření	0.8 - 23.3 mmol/L
Doba měření	60 vteřin
Teplota	Automatické vyvažování zabudovaným čidlem
Kalibrace	Automaticky vybere vhodnou kalibrační křivku použitím kalibrační sondy
Power Source	Dvě 3-voltové lithiové baterie (DL nebo CR2032)
Životnost baterií	1000 měření
Pracovní prostředí	Teplota 10 - 40 C Vlhkost 20 - 80%RH
rozměry	83.8(D) X 55.0(Š) X 14.5(H) mm
Váha	50g
Testovací proužek	
Uskladnění	Skladovat v pokojové teplotě nižší než 30
Záruka	24 měsíců
Balení	25 proužků v boxu


Přesnost měření

Opakovaný test

n	Sample1	Sample2
1	2.1	11.2
2	2.3	11.4
3	2.3	11.4
4	2.1	11.4
5	2.2	11.3
6	2.2	11.7
7	2.3	11.4
8	2.2	11.4
9	2.2	11.9
10	2.2	12.0
11	2.1	11.4
12	2.2	12.0
13	2.1	12.1
14	2.2	11.8
15	2.2	11.8
mean	2.2	11.6
S.D.	0.07	0.30
C.V	3.2	2.6

mmol/L

Korelační test

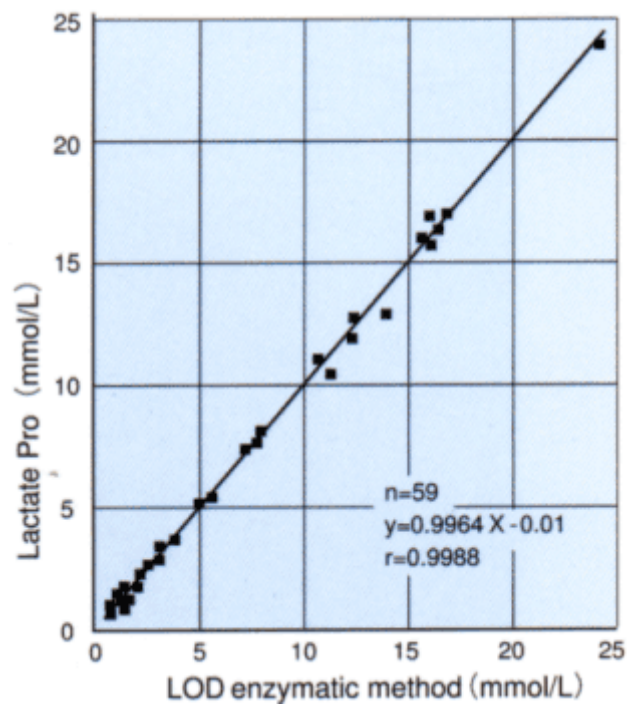

Ceny

K.	Produkt	Popis	Balení	Cena v Kč
				včetně DPH
A	Lactate Pro	Samotný přístroj	1	11.990
B	Lactate Pro Sensors	Testovací proužky	25	1.290
C	Lactate Pro Lactate Pro S. Multilancet-II Lancet 50 pcs.	Startovací set	1	12.850
D	Multilancet - II	Lancetové pero	1	295
E	Lancet 50 pcs	Lancety	50	185
F	Lancet 200 pcs	Lancety	200	390