

Příbalová informace

(datum revize: 26.6.2015)

Údaje k produktu

Obchodní označení:

ProClean

Číslo výrobku, objednávací číslo: 3900

Identifikace výrobce/dovozce:

Mallinckrodt Baker B.V. Tel: (+31) (0)570 - 687500

P.O.Box 1 Fax: (+31) (0)570 - 687574

7400 AA Deventer

The Netherlands

Obor poskytující informace: Mallinckrodt Baker Sales Office Tel.: (31) (0) 570 687500

Použití :

Univerzální enzymatický čistící roztok pro analyzátory

Chemická charakteristika:

Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

57-55-6 Propylen Glycol, 2,5-10%

Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v Bezpečnostním listě.

Všeobecné údaje:

Skupenství: Kapalná

Barva: Fialová

Zápach (vůně): Charakteristický

Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.

Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určeno.

Bod vzplanutí: Nedá se použít.

Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

Tenze par při 20°C: 23 hPa

Hustota při 20°C: Není určena.

Rozpustnost ve / smísitelnost s

vodě: Úplně mísitelná.

Obsah ředidel:

Organická ředidla: 9,0 %

Voda: 89,3 %

Pokyny pro zacházení:

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Pokyny pro skladování:

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.

Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.

Další údaje k podmínkám skladování: Roztok uchovávejte při teplotách 18 až 30°C.

Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu a kyslíku, vztít na radu lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou.

Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

Při požití: Vypláchnout ústa. Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

Další bezpečnostní informace : Viz. Bezpečnostní list

- Otevřenou reagentii je nutné spotřebovat do 6 měsíců, nebo do data spotřeby uvedeném na obalu.
- Nepoužívejte ředící reagentii po datu spotřeby uvedeném na vnějším obalu reagentie.

Návod k použití :

- Čistící roztok použijte dle návodu k použití daného analyzátoru.

Další informace k použití : Viz. Návod k obsluze analyzátoru.