

Sada reagensií pro analyzátor močového sedimentu**Příbalový leták**

Název	Sada reagensií pro analyzátor močového sedimentu
Obsah sady	Roztok Focus, Standardní roztok, Pozitivní kontrola a Negativní kontrola
Specifikace	60 ml x 4 (tzn. 1 x Roztok Focus, 1 x Standardní roztok, 1 x Pozitivní kontrola a 1 x Negativní kontrola)
Určení použití	Negativní kontrola, Pozitivní kontrola a Standardní roztok jsou používány pro kontrolu kvality před měřením. Roztok Focus je používán pro vymezení správné pozice zaostření kamery před měřením.
Princip testu	Princip zobrazení částic v usměrněném toku kapaliny
Složka	Pozitivní kontrola, Standardní roztok a roztok Focus: erytrocyty, pufr Negativní kontrola: pufr

Skladovací podmínky a stabilita

Skladujte pevně uzavřené při teplotě 2-8 °C na suchém místě, zabraňte přímému slunečnímu záření. Stabilita je 6 měsíců bez otevření. Stabilita po otevření je 30 dnů, pouze pro Standardní roztok 7 dní.

Použití pro přístroj	Analyzátor močového sedimentu
Použití	Viz Uživatelský manuál pro automatický analyzátor močového sedimentu
Požadavky na vzorek	Vzorek čerstvé moči bez centrifugace
Ukazatel výkonnosti	pH má hodnotu cca 7,10 ± 0,20 při teplotě (25±1) °C
Reference	Viz štítek


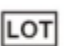




Důležité poznámky

1. Před použitím jemně promíchejte a zabraňte přetížení.
2. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
3. V případě zasažení očí vyplachujte oči teplou vodou po dobu několika minut (zajistěte otevřené oči). Při výskytu bolesti nebo otoku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při potřísnění omyjte pokožku mýdlem a vodou.

Bibliografie

1. Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662, 1983
2. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - Second Edition.

Vysvětlení symbolů

 Prosim, čtěte uživatelský manuál	 Skladujte při	 Výrobce
 Stupeň nebezpečnosti	 Číslo šarže	 Stabilita do
 V souladu se směrnicí EU 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích <i>in vitro</i>		
 Autorizovaný zástupce	 Uchovávejte na tmavých místech	

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 04/2013



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

<http://www.dirui.com.cn>



Emergo Europe Molenstraat 15
2513 BH The Hague The Netherlands