



## **Systémový roztok Sheath pro analyzátor močového sedimentu**

### **Příbalový leták**

<b>Název</b>	Systémový roztok Sheath pro analyzátor močového sedimentu
<b>Specifikace</b>	10 L/15L/20L
<b>Určení použití</b>	Roztok obklopí vzorek, tím dojde k vytvoření usměrněného toku částic, a to umožní provést počítání jednotlivých částic močového sedimentu
<b>Princip testu</b>	Princip zobrazení částic v usměrněném toku kapaliny
<b>Složka</b>	PBS pufr, chlorid sodný, EDTA, neiontový surfaktant

#### **Skladovací podmínky a stabilita**

Skladujte pevně uzavřené při teplotě 2-30 °C na suchém místě, zabraňte přímému slunečnímu záření. Stabilita je 18 měsíců bez otevření. Stabilita po otevření je 30 dnů.

**Použití pro přístroj** Analyzátor močového sedimentu

**Použití** Viz Uživatelský manuál pro automatický analyzátor močového sedimentu

**Požadavky na vzorek** Vzorek čerstvé moči bez centrifugace

**Ukazatel výkonnosti** pH má hodnotu cca  $7,55 \pm 0,20$  při teplotě  $(25 \pm 1) ^\circ\text{C}$


#### **Důležité poznámky**

1. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
2. V případě zasažení očí vyplachujte oči teplou vodou po dobu několika minut (zajistěte otevřené oči). Při výskytu bolesti nebo otoku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při potřísnění omyjte pokožku mýdlem a vodou.

#### **Bibliografie**

1. Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662, 1983
2. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - Second Edition.

## Vysvětlení symbolů

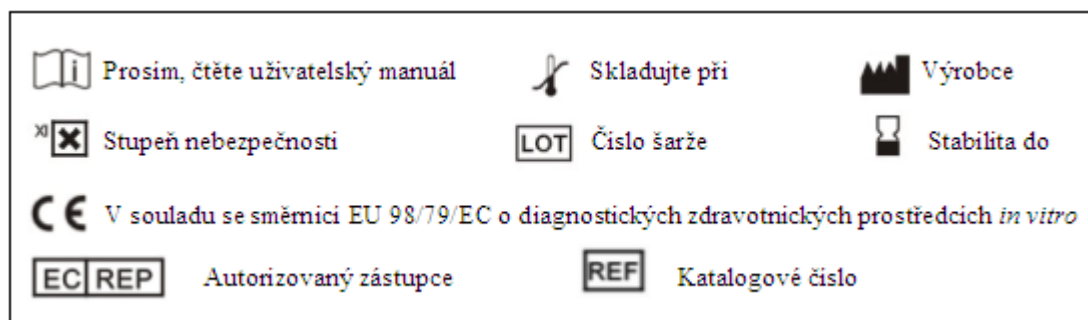

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 12/2013



**DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.**

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: [dirui@dirui.com.cn](mailto:dirui@dirui.com.cn)

<http://www.dirui.com.cn>



Emergo Europe Molenstraat 15  
2513 BH The Hague The Netherlands