

LINEA *ultima* Cleaner

Katalogové číslo: LUW 002

Balení: 4 x 500 ml

Pro in vitro diagnostické použití.

Pouze pro profesionální použití.



Určení

Linea *ultima* Cleaner je čistícím roztokem pro močové analyzátory IRIS iQ™200.

Diagnostická souprava Linea *ultima* Cleaner je funkčním ekvivalentem výrobků distribuovaných originálním výrobcem (OEM – zkratka z anglického Original Equipment Manufacturer).

Použití

Linea *ultima* Cleaner je čistícím roztokem pro močové analyzátory IRIS iQ™200 . Je určený pouze pro vyškolenou profesionální obsluhu.

Diagnostická souprava Linea *ultima* Cleaner je funkčním ekvivalentem OEM. Svými parametry, funkčností a kvalitou plně nahrazuje potřebu použití originálního výrobku distribuovaného originálním výrobcem.

Složení

Čistící roztok Linea *ultima* Cleaner obsahuje chlornan sodný (méně než 5 % aktivního chlóru).

Upozornění

- Pouze pro in-vitro diagnostiku.
- Pouze pro profesionální použití.
- Odpad zlikvidujte podle platných předpisů.
- Zabraňte dotyku s pokožkou a sliznicemi. Postižené místo omyjte množstvím vody. Zabraňte požití roztoku. Pokud dojde k požití, postiženému dejte vypít velké množství vody. Pokud obtíže přetrvávají, obraťte se na lékaře.
- Zabraňte kontaminaci čistícího roztoku.

Uskladnění a stabilita

Pracovní roztok Linea *ultima* Working Solution musí být uskladněn při teplotě 2-8 °C na suchém místě. Čistící roztok je stabilní do data expirace, které je vytištěno na obalu, pokud je uskladněn při uvedených podmínkách. Po otevření je doba expirace 1 měsíc při skladování v uzavřené láhvi a při teplotě 2-8 °C.

Návod na použití

Balení Linea ultima Cleaner obsahuje 4x500 ml čistícího roztoku připraveného na použití. Odlijte roztok z láhve Linea ultima Cleaner do zkumavky a tu vložte do stojanu označeného „Control/Focus“ na pozici označenou C. Stojan vložte do močového analyzátoru IRIS iQ™200 (viz Operační manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).

Názvy různých výrobců, jejich přístrojů a produktů výše uvedených mohou být chráněné ochrannou známkou nebo jiným způsobem a jsou zde použité jen na účely reference. Není zasáhnuto do žádných ochranných známek nebo jiných práv. Eurolab Lambda a.s. výslovně odmítá jakoukoliv spojitost s nimi.

Karta bezpečnostních údajů se nachází na www.eurolambda.sk, nebo na vyžádání u distributora.

Výstražné symboly:



Výrobce a distributor:

Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2, Trnava
Tel.: +421 33 5341 448
Fax: +421 33 5443 094
www.eurolambda.sk

Rev. 12/2013