

## **LINEA *ultima* QC / Focusing Kit**

**Katalogové číslo:** LUW 004  
**Balení:** 1 x 125 ml Linea *ultima* QC Positive  
1 x 125 ml Linea *ultima* QC Negative  
2 x 125 ml Linea *ultima* Focusing Solution  
40 ks barkódů Linea *ultima* QC Positive  
40 ks barkódů Linea *ultima* QC Negative  
50 ks barkódů Linea *ultima* Focusing Solution

**Pro in vitro diagnostické použití.**

**Pouze pro profesionální použití.**



### **Určení**

Linea *ultima* QC Positive a Linea *ultima* QC Negative jsou kontrolními roztoky pro močové analyzátory IRIS iQ<sup>TM</sup>200. Linea *ultima* Focusing Solution je roztok pro nastavení optiky močového analyzátoru IRIS iQ<sup>TM</sup>200.

Diagnostická souprava Linea *ultima* QC / Focusing Kit je funkčním ekvivalentem výrobků distribuovaných originálním výrobcem (OEM – zkratka z anglického Original Equipment Manufacturer).

### **Použití**

Linea *ultima* QC Positive a Linea *ultima* QC Negative jsou kontrolními roztoky pro močové analyzátory IRIS iQ<sup>TM</sup>200. Linea *ultima* Focusing Solution je roztok pro nastavení optiky močového analyzátoru IRIS iQ<sup>TM</sup>200. Roztoky jsou určeny pouze pro vyškolenou profesionální obsluhu.

Diagnostická souprava Linea *ultima* QC / Focusing Kit je funkčním ekvivalentem OEM. Svými parametry, funkčností a kvalitou plně nahrazuje potřebu použití originálního výrobku distribuovaného originálním výrobcem.

### **Složení**

Linea *ultima* QC Positive, Linea *ultima* QC Negative a Linea *ultima* Focusing Solution obsahují chlorid sodný a jako konzervační činidlo azid sodný. Linea *ultima* QC Positive a Linea *ultima* QC Negative obsahují také stabilizované erytrocyty.

### **Upozornění**

- Pouze pro in-vitro diagnostiku.
- Pouze pro profesionální použití.
- Odpad zlikvidujte podle platných předpisů.
- Zabraňte dotyku s pokožkou a sliznicemi. Postižené místo omyjte množstvím vody. Zabraňte požití roztoku. Pokud dojde k požití, postiženému dejte vypít velké množství vody. Pokud obtíže přetrvávají, obraťte se na lékaře.
- Zabraňte kontaminaci roztoků.

## Uskladnění a stabilita

Roztoky soupravy Linea *ultima* QC / Focusing Kit musí být uskladněny dobře uzavřené při teplotě 2-8 °C na suchém a tmavém místě. Roztoky jsou stabilní do data expirace, které je vytištěno na obalu, pokud jsou uskladněny při uvedených podmínkách. Po otevření jsou roztoky stabilní 30 dní, pokud jsou uskladněny při uvedených podmínkách.

## Návod na použití

- Linea *ultima* QC Positive je připraven na použití. Před použitím obsah lahvičky důkladně promíchejte.

Linea *ultima* QC Negative je připraven na použití.

Linea *ultima* Focusing Solution je připraven na použití. Před použitím obsah lahvičky důkladně promíchejte.

- Odlijte kontrolní roztok z lahvičky Linea *ultima* QC Positive do 1 zkumavky, nalepte na ni barkód Linea *ultima* QC Positive přiložený v balení a tuto zkumavku vložte do stojanu označeného „Control/Focus“ na pozici označenou „Control+“. Stojan vložte do močového analyzátoru IRIS iQ™200 (viz Operační manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).
- Odlijte kontrolní roztok z lahvičky Linea *ultima* QC Negative do 1 zkumavky, nalepte na ni barkód Linea *ultima* QC Negative přiložený v balení a tuto zkumavku vložte do stojanu označeného „Control/Focus“ na pozici označenou „Control-“. Stojan vložte do močového analyzátoru IRIS iQ™200 (viz Operační manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).
- Odlijte roztok pro nastavení optiky z lahvičky Linea *ultima* Focusing Solution do 1 zkumavky, nalepte na ni barkód Linea *ultima* Focusing Solution přiložený v balení a tuto zkumavku vložte do stojanu označeného „Control/Focus“ na pozici označenou „Focus“. Stojan vložte do močového analyzátoru IRIS iQ™200 (viz Operační manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).

*Názvy různých výrobců, jejich přístrojů a produktů výše uvedených mohou být chráněné ochrannou známkou nebo jiným způsobem a jsou zde použité jen na účely reference. Není zasáhnuto do žádných ochranných známek nebo jiných práv. Eurolab Lambda a.s. výslovně odmítá jakoukoliv spojitost s nimi.*

Karta bezpečnostních údajů se nachází na [www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk), nebo na vyžádání u distributora.

### **Výrobce a distributor:**

Eurolab Lambda a.s.  
T.Milkina 2, Trnava  
Tel.: +421 33 5341 448  
Fax: +421 33 5443 094  
[www.eurolambda.sk](http://www.eurolambda.sk)