

LINEA *ultima* Standard Kit

Katalogové číslo: LUW 005
Balení: 4 x 125 ml Linea *ultima* Standard Solution
50 ks barkódů Linea *ultima* Standard Solution

Pro in vitro diagnostické použití.

Pouze pro profesionální použití.



Určení

Linea *ultima* QC Standard Solution je kalibrační roztok pro močové analyzátory IRIS iQTM200.

Diagnostická souprava Linea *ultima* Standard Kit je funkčním ekvivalentem výrobků distribuovaných originálním výrobcem (OEM – zkratka z anglického Original Equipment Manufacturer).

Použití

Linea *ultima* Standard Solution je kalibrační roztok pro močové analyzátory IRIS iQTM200. Roztok je určen pouze pro vyškolenou profesionální obsluhu.

Diagnostická souprava Linea *ultima* Standard Kit je funkčním ekvivalentem OEM. Svými parametry, funkčností a kvalitou plně nahrazuje potřebu použití originálního výrobku distribuovaného originálním výrobcem.

Složení

Linea *ultima* Standard Solution obsahuje chlorid sodný, stabilizované erytrocyty a jako konzervační činidlo azid sodný.

Upozornění

- Pouze pro in-vitro diagnostiku.
- Pouze pro profesionální použití.
- Odpad zlikvidujte podle platných předpisů.
- Zabraňte dotyku s pokožkou a sliznicemi. Postižené místo omyjte množstvím vody. Zabraňte požití roztoku. Pokud dojde k požití, postiženému dejte vypít velké množství vody. Pokud obtíže přetrvávají, obraťte se na lékaře.
- Zabraňte kontaminaci roztoků.

Uskladnění a stabilita

Roztoky soupravy Linea *ultima* Standard Kit musí být uskladněny dobře uzavřené při teplotě 2-8 °C na suchém a tmavém místě. Roztoky jsou stabilní do data expirace, které je vytištěno na obalu, pokud jsou uskladněny při uvedených podmínkách. Po otevření jsou roztoky stabilní 7 dní, pokud jsou uskladněny při uvedených podmínkách.

Návod na použití

- Linea *ultima* Standard Solution je připraven na použití. Před použitím obsah lahvičky důkladně promíchejte.
- Odlijte standardní roztok z lahvičky Linea *ultima* Standard Solution do 10 zkumavek, nalepte na ně barkódy Linea *ultima* Standard Solution přiložené v balení a tyto zkumavky vložte do stojanu určeného na kalibraci. Stojan vložte do močového analyzátoru IRIS iQ™200 (viz Operační manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).

Názvy různých výrobců, jejich přístrojů a produktů výše uvedených mohou být chráněné ochrannou známkou nebo jiným způsobem a jsou zde použité jen na účely reference. Není zasáhnuto do žádných ochranných známek nebo jiných práv. Eurolab Lambda a.s. výslovně odmítá jakoukoliv spojitost s nimi.

Karta bezpečnostních údajů se nachází na www.eurolambda.sk, nebo na vyžádání u distributora.

Výrobce a distributor:

Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2, Trnava
Tel.: +421 33 5341 448
Fax: +421 33 5443 094
www.eurolambda.sk

Rev. 11/2013