



CD-Chex[®] CD34

Kontrolka plné krve pro stanovení CD34 pozitivních buněk průtokovým cytometrem

Skladování :

2°– 10 °C

Stabilita v uzavřeném stavu 90 dní

Stabilita po otevření 30 dní

Kontrolka plné krve

CD-Chex CD34 zastupuje vzorky obsahující CD34 pozitivní buňky mající stejné charakteristiky jako progenitorové buňky. CD34 pozitivní buňky mají nízký Side Scatter, CD34 výraz a nízký výraz CD45 (v porovnání s lymfocyty). Produkt je k dispozici ve třech hladinách. Hodnoty v příbalovém letáku spadají do rozsahu : 0,05% (3-5 buněk/μl) pro hladinu 1, 0,5% (30-50 buněk/μl) pro hladinu 2 a 1,75% (90-150 buněk/μl) pro hladinu 3.

Vícenásobná platforma



CD-Chex CD34 je určen pro užití s BD ProCOUNT[™] Progenitor Enumeration Kit, Beckman Coulter[®] Stem-Kit a se systémem používajícím ISHAGE protokol pro stanovení CD34 pozitivních buněk. Produkt může být užíván s různými systémy, reagensii a protilátkami třídy III.

Bezpečnostní informace

CD-Chex CD34 je vyroben z leukocytů a erytrocytů lidské krve. Materiál použitý v CD-Chex CD34 je testován na HIV, HCV a hepatitidu B, aby došlo k minimalizaci nebezpečí plynoucího z manipulace s tímto potenciálně infekčním materiálem.



CD-Chex CD34	Catalog No.
1x1.0ml (Level 1)	213336
2x1.0ml (Level 1)	213337
1x1.0ml (Level 2)	213346
2x1.0ml (Level2)	213347
2x1.0ml (Level 1, Level 2)	213338
4x1.0ml (Level 1, Level2)	213339
1x1.0ml (Level 3)	213382
2x1.0ml (Level 3)	213383

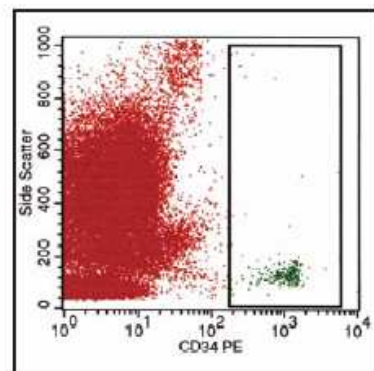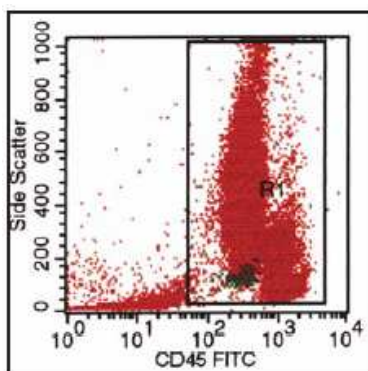

STATS[®]

Streck nabízí svým zákazníkům zdarma zapojení se do mezilaboratorního systému kontroly kvality. STATS poskytuje jednoduchý vstup dat šetřící čas a náležitě osvědčení. Data mohou být zadávána dopisem, faxem, e-mailem. Uživatelé STATS mají nyní přímý přístup k výsledkům na www.streck.com. STATS-Link[®] účastníci obdrží e-mailem upozornění, že jejich report je online k dispozici.

Streck
Clinical Laboratory Products You Can Count On.

U.S. Patents 5,196,182; 5,260,048; 5,460,797; 5,459,073; 5,849,517; 5,811,099

MEDISTA
spol. s r.o.
U krčské vodárny 939/1a
140 00 Praha 4
Czech Republic



MEDISTA

tel.: 241444525
241444668, 241444637
Fax: 241445980
medista@medista.cz
www.medista.cz