
Standardní roztok

URČENÍ POUŽITÍ

Tento Standardní roztok se je určen k použití jako exkluzivní standardní roztok pro osmometry ARKRAY, Inc.

ÚVOD

Dva typy Standardního roztoku jsou navrženy pro exkluzivní použití s osmometry ARKRAY, Inc. Použití Standardního roztoku s těmito přístroji dělá měření osmotického tlaku, rychlejší, jednodušší a přesnější. Prosím, před použitím si pečlivě přečtete instrukce níže.

SLOŽENÍ

300 mOsm Standardní roztok (modrý uzávěr)

Obsahuje: Solný roztok (2 lahvičky, 20 ml každá)

1000 mOsm Standardní roztok (červený uzávěr)

Obsahuje: Solný roztok (2 lahvičky, 20 ml každá)

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Postupujte podle instrukcí uvedených v operačním manuálu příslušného přístroje.
2. Nalijte dostatečné množství Standardního roztoku nebo vzorku do kepu/ů na vzorek.
3. Pro kalibraci použijte pro STD1 deionizovanou vodu, pro STD2 300 mOsm Standardní roztok a pro STD3 1000 mOsm Standardní roztok.

UPOZORNĚNÍ

1. Pro měření použijte čisté kepy. Pokud v roztoku vidíte plavat nějakou nečistotu, odstraňte ji před měřením. Může to ucpat jehlu nebo hadičky.
2. Nezaměňte pořadí roztoků při kalibraci.

VAROVÁNÍ

1. V případě, že Standardní roztok přijde do styku s očima, okamžitě je vypláchněte proudem vody a navštivte lékaře.
2. Po použití pevně uzavřete uzávěry lahviček. Po otevření spotřebujte veškerý roztok tak rychle, jak je to jen možné (během 2 měsíců).
3. Pokud kolem uzávěru Standardního roztoku narůstá sůl, dobře jej otřete před nalíváním roztoku do kepu. Pokud by byla sůl zanesena do kepu, koncentrace roztoku v kepu by se pozměnila a vedlo by to k falešným hodnotám kalibrace a nesprávné kalibrační křivce.
4. Standardní roztok je kvalitní pouze během určené doby, pokud je správně uchováván. Pokud je skladován nesprávně během určené doby, nemusí být zachovány všechny charakteristiky roztoku.

SKLADOVÁNÍ

Zabraňte přímému slunečnímu světlu. Skladujte při pokojové teplotě (1 – 30 °C) pevně uzavřené.

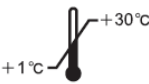
DATUM EXPIRACE

Datum je vytištěno na balení a na štítku na lahvičce.

NÁVAZNOST HODNOT OSMOTICKÉHO TLAKU

Hodnoty osmotického tlaku pro standardní roztoky jsou přiřazeny za použití materiálů a měřicích metod specifikovaných společnostmi ARKRAY, Inc.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Symbol	Popis
	Teplota skladování
	In vitro diagnostický zdravotnický prostředek
	Výrobce
	Číslo šarže
	Použití do
	Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství
	Viz instrukce pro použití
	Tento produkt vyhovuje Nařízení 98/79/EC.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi,
Shiga 520-3306, Japan



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 5 1183 AT
Amstelveen, the Netherlands

C703-1004F

