

Cleaning liquid II

(Concentrated type)

Příbalový leták

Název	Cleaning liquid II
Specifikace	200 ml, 500 ml, 1 000 ml
Určení použití	Roztok požívaný pro čištění a proplach systému hadiček/potrubí v analyzátoch moči.
Princip testu	Princip zobrazení částic v usměrněném toku kapaliny
Složky	Nízko pěnicí surfaktant

Skladovací podmínky a stabilita

Skladujte pevně uzavřené při teplotě 2-30 °C na suchém místě chráněném před slunečním svitem. Stabilita bez otevření je uvedena na štítku. Stabilita po otevření je 30 dnů.

Použití pro přístroj Hybridní analyzátory moči série FUS a série MUS

Použití Produkt smíchejte s destilovanou vodou v poměru 1:19 (tzn. 1 díl roztoku Cleaning Liquid II + 19 dílů destilované vody). Metoda čištění by měla být provedena v souladu s uživatelským manuálem pro automatické analyzátory moči.

Požadavky na vzorek Vzorek čerstvé moči bez centrifugace

Ukazatel výkonnosti Po rozředění má pH hodnotu $7,60 \pm 1,00$ při teplotě $(25 \pm 1) ^\circ\text{C}$










Důležité poznámky

1. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, v případě kontaktu s pokožkou omyjte okamžitě zasaženou oblast vodou. Pokud je to nezbytné, vyhledejte lékaře.
2. Po použití pevně uzavřete uzávěr.
3. Vzorky, tekutý odpad atd. mohou být potenciálně infekční. Obsluha by měla dodržovat laboratorní bezpečnostní předpisy a nakládat s tekutým odpadem v souladu s předpisy ohledně zdravotnického odpadu, infekčního odpadu a průmyslového odpadu.

Bibliografie

1. Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662, 1983
2. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - Second Edition.

Vysvětlení symbolů

 Prosim, čtěte uživatelský manuál	 Skladujte při	 Výrobce
 Stupeň nebezpečnosti	 Číslo šarže	 Stabilita do
 V souladu se směrnicí EU 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích <i>in vitro</i>		
 Autorizovaný zástupce	 Katalogové číslo	

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 09/2018



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

<http://www.dirui.com.cn>



Emergo Europe Molenstraat 15
2513 BH The Hague The Netherlands