



Analyzátory moči série H










Calibration liquid for Turbidity (*kalibrátor turbidity*)

Příbalový leták

Název	Kalibrátor turbidity pro analyzátory moči série H
Specifikace	8 ml/lahvička
Určení použití	Kalibrátor turbidity série H se používá pro kalibraci turbidity analyzátorů moči série H, a turbidimetru hybridních analyzátorů moči série FUS a analyzátorů moči série MUS.
Princip	Turbidita je měřena za použití kalibrátoru a pomocí teorie rozptylu.
Složení	Kapalina pro kontrolu kvality zákalu Fu MA hydrazinu (800NTU).
Skladovací podmínky a stabilita	Skladujte pevně uzavřené při teplotě 2-8 °C na suchém tmavém místě. Stabilita je uvedena na štítku na lahvičce. Stabilita po otevření je 30 dnů při teplotě 2-8 °C.
Použití pro přístroj	Analyzátory moči série H, hybridní analyzátory moči série FUS a analyzátory moči série MUS
Postup	Viz uživatelský manuál příslušného analyzátoru moči
Vysvětlení výsledku	Po kalibraci turbidimetru bude na obrazovce zobrazeno „calibration OK“ nebo „calibration not OK“. „Calibration OK“ znamená, že kalibrace proběhla úspěšně. „Calibration not OK“ znamená, že kalibrace selhala, opakujte kalibraci nebo vyčistěte turbidimetr.
Omezení metody	Kalibrátor turbidity je použitelný pouze pro hybridní analyzátory moči.
Varování a upozornění	Prosím, dobře promíchejte a zabraňte kontaktu s pokožkou. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte pokožku vodou. V případě zasažení očí vyplachujte oči proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyvolejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.
Výkonnost produktu	Správnost: Zákal = 400 ± 30 NTU

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 9/1/2025

Vysvětlení symbolů

 Prosím, čtěte uživatelský manuál	 Skladujte při	 Výrobce
 Stupeň nebezpečnosti	 Číslo šarže	 Stabilita do
 V souladu se směrnicí EU 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích <i>in vitro</i>		
 Autorizovaný zástupce	 Katalogové číslo	



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

<http://www.dirui.com.cn>



Emergo Europe Molenstraat 15
2513 BH The Hague The Netherlands