



Systémový roztok Sheath pro analyzátor močového sedimentu

Příbalový leták

Název	Systémový roztok Sheath pro analyzátor močového sedimentu
Specifikace	10 L/15L/20L
Určení použití	Roztok obklopí vzorek, tím dojde k vytvoření usměrněného toku částic, a to umožní provést počítání jednotlivých částic močového sedimentu
Princip testu	Princip zobrazení částic v usměrněném toku kapaliny
Složka	PBS pufr, chlorid sodný, EDTA, neiontový surfaktant

Skladovací podmínky a stabilita

Skladujte pevně uzavřené při teplotě 2-30 °C na suchém místě, zabraňte přímému slunečnímu záření. Stabilita je 18 měsíců bez otevření. Stabilita po otevření je 30 dnů.

Použití pro přístroj Analyzátor močového sedimentu

Použití Viz Uživatelský manuál pro automatický analyzátor močového sedimentu

Požadavky na vzorek Vzorek čerstvé moči bez centrifugace

Ukazatel výkonnosti pH má hodnotu cca $7,55 \pm 0,20$ při teplotě $(25 \pm 1) ^\circ\text{C}$










Důležité poznámky

1. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
2. V případě zasažení očí vyplachujte oči teplou vodou po dobu několika minut (zajistěte otevřené oči). Při výskytu bolesti nebo otoku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Při potřísnění omyjte pokožku mýdlem a vodou.

Bibliografie

1. Ferris JA Comparison and standards of urine microscopy Lab Med 14:659-662, 1983
2. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - Second Edition.

Vysvětlení symbolů

 Prosim, čtěte uživatelský manuál	 Skladujte při	 Výrobce
 Stupeň nebezpečnosti	 Číslo šarže	 Stabilita do
 V souladu se směrnicí EU 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích <i>in vitro</i>		
 Autorizovaný zástupce	 Katalogové číslo	

Datum schválení a úpravy příbalového letáku 12/2013



DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD.

95 Yunhe Street, New & High Tech.

Development Zone Changchun, Jilin 130012 P.R.China

Tel: +86 431 85100409

Fax: +86 431 85172581

E-mail: dirui@dirui.com.cn

<http://www.dirui.com.cn>

 EC REP

Emergo Europe Molenstraat 15
2513 BH The Hague The Netherlands