

LINEA *ultima* Diluent

Katalogové číslo: LUW 003

Balení: 4 x 500 ml

Pro in vitro diagnostické použití.

Pouze pro profesionální použití.



Určení

Linea *ultima* Diluent je promývacím a ředicím roztokem pro močové analyzátoary IRIS iQ™200.

Diagnostická souprava Linea *ultima* Diluent je funkčním ekvivalentem výrobků distribuovaných originálním výrobcem (OEM – zkratka z anglického Original Equipment Manufacturer).

Použití

Linea *ultima* Diluent je promývacím roztokem pro močové analyzátoary IRIS iQ™200 a ředicím roztokem pro moče s velkým počtem elementů. Je určený pouze pro vyškolenou profesionální obsluhu.

Diagnostická souprava Linea *ultima* Diluent je funkčním ekvivalentem OEM. Svými parametry, funkčností a kvalitou plně nahrazuje potřebu použití originálního výrobku distribuovaného originálním výrobcem.

Složení

Promývací a ředicí roztok Linea *ultima* Diluent obsahuje jako konzervační činidlo 2-phenoxyethanol (méně než 1 %).

Upozornění

- Pouze pro in-vitro diagnostiku.
- Pouze pro profesionální použití.
- Odpad zlikvidujte podle platných předpisů.
- Zabraňte dotyku s pokožkou a sliznicemi. Postižené místo omyjte množstvím vody. Zabraňte požití roztoku. Pokud dojde k požití, postiženému dejte vypít velké množství vody. Pokud obtíže přetrvávají, obraťte se na lékaře.
- Zabraňte kontaminaci promývacího a ředicího roztoku.

Uskladnění a stabilita

Promývací a ředicí roztok Linea *ultima* Diluent musí být uskladněn při teplotě 2-30 °C na suchém místě. Roztok je stabilní do data expirace, které je vytištěno na obalu, pokud je uskladněn při uvedených podmínkách.

Návod na použití

Balení Linea *ultima* Diluent obsahuje 4x500 ml čistícího roztoku připraveného na použití. Odlijte roztok z láhve Linea *ultima* Diluent do 2 zkumavek a ty vložte do stojanu označeného „Control/Focus“ na pozici označené D. Stojan vložte do močového analyzátoru IRIS iQ™200 (viz Operační manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).

Použití na ředění moči: Na základě výsledku analýzy močového sedimentu zvolte patřičné ředění a vzorek moči nařeďte ve Vámi zvoleném poměru s Linea *ultima* Diluent (viz Operační manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).

Názvy různých výrobců, jejich přístrojů a produktů výše uvedených mohou být chráněné ochrannou známkou nebo jiným způsobem a jsou zde použité jen na účely reference. Není zasáhnuto do žádných ochranných známek nebo jiných práv. Eurolab Lambda a.s. výslovně odmítá jakoukoliv spojitost s nimi.

Karta bezpečnostních údajů se nachází na www.eurolambda.sk, nebo na vyžádání u distributora.

Výstražné symboly:



Výrobce a distributor:

Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2, Trnava
Tel.: +421 33 5341 448
Fax: +421 33 5443 094
www.eurolambda.sk

Rev. 12/2013