

LINEA *ultima* Working Solution

Katalogové číslo: LUW 001

Balení: 2 x 7 l, 1 ks filtr

4 x 7 l, 2 ks filtr

Pro in vitro diagnostické použití.

Pouze pro profesionální použití.



Určení

Linea *ultima* Working Solution je pracovním roztokem pro močové analyzátory IRIS iQ™200.

Diagnostická souprava Linea *ultima* Working Solution je funkčním ekvivalentem výrobků distribuovaných originálním výrobcem (OEM – zkratka z anglického Original Equipment Manufacturer).

Použití

Linea *ultima* Working Solution je určený pro močové analyzátory IRIS iQ™200 . Je určený pouze pro vyškolenou profesionální obsluhu.

Diagnostická souprava Linea *ultima* Working Solution je funkčním ekvivalentem OEM. Svými parametry, funkčností a kvalitou plně nahrazuje potřebu použití originálního výrobku distribuovaného originálním výrobcem.

Složení

Pracovní roztok Linea *ultima* Working Solution obsahuje azid sodný jako konzervační činidlo (koncentrace 0,05%). Také obsahuje etoxylované C12-15-alkylalkoholy.

Upozornění

- Pouze pro in-vitro diagnostiku.
- Pouze pro profesionální použití.
- Odpad zlikvidujte podle platných předpisů.
- Zabraňte dotyku s pokožkou a sliznicemi. Postižené místo omyjte množstvím vody. Zabraňte požití roztoku. Pokud dojde k požití, postiženému dejte vypít velké množství vody. Pokud obtíže přetrvávají, obraťte se na lékaře.
- Zabraňte kontaminaci pracovního roztoku.

Uskladnění a stabilita

Pracovní roztok Linea *ultima* Working Solution musí být uskladněn při teplotě 2-30 °C na suchém místě. Pracovní roztok je stabilní do data expirace, které je vytištěno na obalu, pokud je uskladněn při uvedených podmínkách.

Návod na použití

Pracovní roztok Linea *ultima* Working Solution je připraven na použití. Kanystř s pracovním roztokem připojte k příslušné hadičce od analyzátoru IRIS iQ™200, na její konec předtím připojte přiložený filtr (viz Operační manuál k analyzátoru IRIS iQ™200).

Názvy různých výrobců, jejich přístrojů a produktů výše uvedených mohou být chráněné ochrannou známkou nebo jiným způsobem a jsou zde použité jen na účely reference. Není zasáháno do žádných ochranných známek nebo jiných práv. Eurolab Lambda a.s. výslovně odmítá jakoukoliv spojitost s nimi.

Karta bezpečnostních údajů se nachází na www.eurolambda.sk, nebo na vyžádání u distributora.

Výrobce a distributor:

*Eurolab Lambda a.s.
T.Milkina 2, Trnava
Tel.: +421 33 5341 448
Fax: +421 33 5443 094
www.eurolambda.sk*

Rev. 12/2013